



## INSTRUCCIONES DE USO – CERA DE ALIVIO

<b>Fabricante:</b>	Carmel Group Inc. 10220 Armand-Lavergne Avenue Montreal, Quebec H1H 3N4, Canada Teléfono: 514-270-5377 Fax: 514-270-2025 E-mail: info@carmelindustries.com
<b>Representante EU:</b>	Cmc Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lengo 18, CP 29006 Malaga, España Teléfono: +34951214054 E-mail: Info@cmcmedicaldevices.com
<b>Nombre de la Marca:</b>	Carmel Group Inc.
<b>Descripción del Producto:</b>	Cera de Ortodoncia Otros nombres: Cera dental de alivio, Cera para paciente
<b>Códigos del producto:</b>	RW40180, RW40113, RW40210, RW40219, RW40201, RW40209, RW40216, RW40221, RW40204, RW40212, RW40202, RW40203, RW40205, RW40080, RW40010, RW40480, RW40410, RW40312, RW40323, RW40302, RW40302, RW40309

Este dispositivo está destinado a un solo uso

Instrucción de uso:

**Se utiliza para cubrir las secciones de los aparatos de ortodoncia que causan irritación.**

**INSTRUCCIONES:** Con las manos limpias, pellizcar un pequeño trozo de cera, hacer una bola para ablandarla y luego aplanarla. Colocar la cera sobre la zona del aparato que causa la irritación. Reemplazar cada 60 minutos.

Conservar este producto a temperatura ambiente. Evite congelar el producto.

Contacta a tu ortodoncista si el dolor persiste. Si has probado la cera y no te ha ayudado, ponte en contacto con tu ortodoncista. La irritación y las llagas persistentes pueden infectarse y provocar problemas más graves. Si lo estás pasando muy mal con tus brackets, no temas en ponerte en contacto con tu ortodoncista. Ellos te ayudarán a hacerlos más cómodos.